

# SACOCHÉ ELITE

La solution durable et performante pour transporter vos produits et dispositifs médicaux sensibles à la température.



## NOTICE D'USAGE

Cette sacoche vous est livrée avec deux jeux de 2 plaques eutectiques, 2 plaques de séparation, 1 bloc alvéolé de mousse\* pour protéger les flacons de doses de vaccins

### À RECEPTION DE VOTRE KIT SACOCHE ELITE

1. Placer les 4 plaques eutectiques 36 heures au moins dans un congélateur à  $-20^{\circ}\text{C}$ .  
Les plaques doivent être placées bien à plat.

**ASTUCE :** Bien identifier chaque jeu de plaques pour assurer 36 de congélation entre chaque utilisation.

### PRÉPARATION DE VOTRE JOURNÉE DE VACCINATION (Bien respecter l'ordre indiqué)


2. Sortir uniquement 2 plaques eutectiques et les placer à température ambiante ( $+20^{\circ}\text{C}/+25^{\circ}\text{C}$ ) en position debout, pendant 5 minutes pour effectuer une remontée en température.
3. Placer une plaque eutectique au fond de la sacoche et poser dessus une plaque de séparation.
4. Insérer le bloc alvéolé de mousse et les flacons de doses de vaccins.
5. Poser dessus la deuxième plaque de séparation.
6. Mettre ensuite la seconde plaque eutectique.
7. Refermer la sacoche grâce à sa fermeture magnétique.
8. Sécuriser votre sacoche en insérant le scellé dans l'orifice de fermeture prévu à cet effet.

### ENTRETIEN

Pour le nettoyage, nous vous recommandons d'utiliser un désinfectant adapté.  
Il est également possible de nettoyer la sacoche avec de l'eau tiède savonneuse.

### STOCKAGE

Après utilisation, ranger la sacoche dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière.

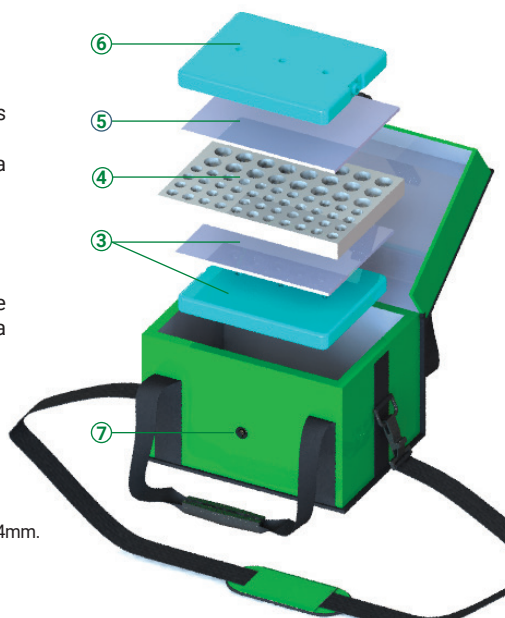

\* Ce bloc alvéolé peut contenir 44 flacons 2R de diamètre 16mm et 24 flacons 10R de diamètre 24mm.